

Individuelle
AUFTRAGS-
FERTIGUNG

san
tec

san
tec



Santec Chirurgisches Nahtmaterial
für die Herz-, Gefäß- und Allgemeinchirurgie

Santec Medizinische Produkte
Herstellung und Vertrieb von Einmalartikeln
für die Infusions-, Transfusions- und
Intensivmedizin sowie für die Anästhesie

CE 1275

Produktion - Vertrieb - Produktmanagement

Santec Medicalprodukte GmbH
Mainstrasse 32
D-63868 Großwallstadt
Telefon +49(0)6022 508951-0
Telefax +49(0)6022 508951-29
info@santec-medical.de
www.santec-medical.de

Wolfgang Leichtenstern, Geschäftsführer, **Vertrieb Süd**
Detlev-Sven Neumann, Geschäftsführer, **Vertrieb Nord**

Auftragsannahme

Bernadette Wießmann
Telefon +49(0)6022 508951-21
Telefax +49(0)6092 508951-29
info@santec-medical.de

Vertrieb Ost

Brigitte Behr-Ostheimer
Mobil +49(0)160 9099 8302
brigitte.behr-ostheimer@santec-medical.de

Vertrieb Nordrhein-Westfalen

Horst Derksen
Mobil +49(0)177 1652 029
horst.derksen@santec-medical.de

implant

Chordae Loop
Repair/Replacement



santec medicalprodukte gmbh

www.santec-medical.de

santec medicalprodukte gmbh



implant *Chordae Loop* Repair/Replacement

Chordae Loop ist ein nicht resorbierbares Implantat für Chordae repair/replacement zur Mitralklappenrekonstruktion.

Das Implantat, basierend auf einem durchgehenden ePTFE-Faden der Stärke CV-4 mit 2 endständigen Nadeln PH17, besteht aus 4 gleich langen Loops, verknötet auf der Oberseite eines PTFE-Pledgets und den auf der Unterseite des Pledgets austretenden Fadenenden.

Das Pledget mit den Loops wird auf dem Papillarmuskel angenäht, wobei ein zweites Pledget als Nahtwiderlager dient. Die Loops werden an dem Klappensegel befestigt.


Produktspezifikation:

- Implantat aus ePTFE-Faden CV-4 mit 4 gleich langen Loops
- Beide Fadenenden jeweils armiert mit 1x PH17-Nadel
- Befestigung auf einem ersten Pledget „P“ (6 x 3 mm)
- Zweites Pledget „P“, lose, als Nahtwiderlager
- Fadenlänge 35 - 42 cm, abhängig von Looplänge
- Verfügbare Looplängen in mm:

| | |
|---------------------|---------------------|
| 10 = REF 710 | 20 = REF 703 |
| 12 = REF 711 | 22 = REF 704 |
| 14 = REF 700 | 24 = REF 712 |
| 16 = REF 701 | 26 = REF 713 |
| 18 = REF 702 | |

- Verpackungsart:
4 x 1 Implantat, einzeln, steril, Semibox
Weitere Verpackungsarten auf Anfrage
- Entsprechend der FDA-Vorgabe ist eine USP-Angabe für die Fadenstärke nicht möglich

Pledgets Nahtwiderlager

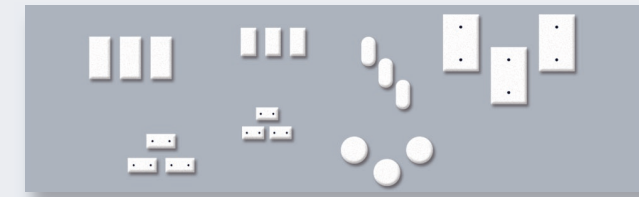

Für Anwendungen in der Herz-, Gefäß- und Allgemeinchirurgie liefern wir nicht resorbierbare Pledgets unterschiedlicher Größe und Qualität. Es handelt sich hierbei um PTFE-Filze (Teflon), die als Implantate für den medizinischen Einsatz zugelassen sind und zur Unterstützung der Nähte bei empfindlichen Geweben eingesetzt werden.

Nahtmaterial

Verfügbar ist ein komplettes Nahtmaterialprogramm mit allen resorbierbaren und nicht resorbierbaren Fäden, Nadeln und Konfigurationsvarianten entsprechend der gewünschten Anwendung.

Die Kunden definieren die Kombination aus Faden, Nadel und Pledget.